

### **Gebruiksaanwijzing:**

#### **Extra tips voor RegJoint**

##### **Extra Tips:**

- Minimale botresectie van 5 mm.
- Selecteer de gewenste maat en week deze eerst gedurende 1 minuut in steriel zoutwater. Maatkeus: Diameter 14 mm of 16 mm voor vrouwen; Diameter 18 mm of 20 mm voor mannen. RegJoint moet de hele botoppervlakte bedekken.
- RegJoint kan op verschillende manieren gefixeerd worden:
  1. Fixeren op één plek aan het diepste (ulnaire) deel van het gewrichtskapsel met een oplosbare 2,0 hecht draad.
  2. Fixeren op een of twee plekken met oplosbare hechtingen door het os trapezium.
  3. Fixeren met een K-draad door RegJoint, het os trapezium en metacarpus I.
- Het gewrichtskapsel volledig sluiten met oplosbare 0,0-1,0 hecht draad. Gaten in het gewrichtskapsel kunnen synovitis veroorzaken.

##### Revalidatie:

- 4 weken gips.
- Pijn kan blijven voor 3 maanden postoperatief.
- Voorzichtige en langzame voortzetting van revalidatie is vereist.

Vorenstaande tips die mogelijk als adviezen kunnen worden aangemerkt of als ondersteuning (bij het gebruik) van de producten, zijn door J.B. Implants Services bv naar beste weten en kunnen verstrekt. J.B. Implants Services bv en haar werknemers zijn uitdrukkelijk géén medisch specialisten en functioneren enkel als wederverkoper van Producten. Indien J.B. Implants Services bv op verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtgever ondersteuning, advies of informatie verschaft, zijn J.B. Implants Services bv en haar werknemers nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het volgen van een dergelijk advies of het gebruik van deze informatie en/of ondersteuning door Opdrachtgever.