

# OSTENIL® TENDON

Visco-elastische oplossing voor peritendineuze injectie of voor injectie in de peesschede

## GEBRUIKSAANWIJZING

NL

### OSTENIL® TENDON

Natriumhyaluronaat 2,0% uit fermentatie. Visco-elastische oplossing voor peritendineuze injectie of voor injectie in de peesschede. Steriel door vochtige hitte.

#### Samenstelling:

1 ml isotone oplossing bevat 20,0 mg natriumhyaluronaat en ook natriumchloride, dinatriumwaterstoffsfaaf, natriumdwaterstoffsfaaf, mannitol en water voor injecties.

#### Toepassing:

Voor de behandeling van pijn en beperkte bewegingsvrijheid bij peesaandoeningen.

#### Tegenaanwijzingen:

OSTENIL® TENDON niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid tegen een van de ingrediënten.

#### Wisselwerkingen:

Onverenigbaarheid van OSTENIL® TENDON met andere voor de pees gebruikte middelen zijn tot nu toe niet bekend.

#### Ongewenste effecten:

Na het gebruik van OSTENIL® TENDON kunnen aan de behandelde pees lokale bijwerkingen als pijn, warm gevoel, bloedingstoring, roodheid en zwelling optreden.

#### Dosering en wijze van gebruik:

OSTENIL® TENDON in totaal 2 maal één keer per week rond de aangedane pees spuiten of in de aangedane peesschede injecteren. Het is mogelijk om verschillende pezen tegelijk te behandelen. Het kan zijn dat de behandeling herhaald moet worden.

Zolang de steriele verpakking niet geopend is, zijn de inhoud en het oppervlak van de OSTENIL® TENDON voorgevulde spuit steriel. De voorgevulde spuit wordt uit de steriele verpakking gehaald, de dop van de Luer-Lok™ aansluiting verwijderd, de gepaste canule 25 tot 27 G) erop gezet en deze wordt met een lichte draaiing vastgezet. Eventuele luchtbelletjes moeten voor injectie uit de spuit verwijderd worden.

#### Voorzorgsmaatregelen:

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik van OSTENIL® TENDON bij patiënten met een bekende overgevoeligheid voor geneesmiddelen! Neem de algemene voorzorgsmaatregelen in acht voor peritendineuze injecties of injecties in de peesschede. OSTENIL® TENDON moet correct in de peesschede of correct rond de aangedane pees geïnjecteerd worden zo nodig onder röntgencontrole. Zenuwletsels en injecties in bloedvaten vermijden! Aangezien er onvoldoende ervaring is met het gebruik van natriumhyaluronaat bij kinderen en bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, wordt het gebruik van OSTENIL® TENDON in deze gevallen niet aangeraden. Niet gebruiken als de voorgevulde spuit of de steriele verpakking beschadigd zijn. Oplossingen die niet onmiddellijk na het aanbreken van de verpakking gebruikt worden, moeten weggegooid worden. Anders is de steriliteit niet meer gegarandeerd. Tussen 2 °C en 25 °C bewaren! Let op de vervaldatum! Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren!

#### Eigenschappen en werkingsmechanisme:

Een pees is een robuuste structuur uit vezelig bindweefsel, die moet dienen om de kracht van de spieren over te dragen op de beenderen en om spanningen te weerstaan tijdens spiercontracties. Pezen kunnen omgeven worden door verschillende structuren: bv. vezelige banden, synoviale membranen, peesschedes, slijmbeurzen. Verkeerde belasting of overbelasting kan ontsteking en/of degeneratieve veranderingen teweegbrengen in de pezen, wat leidt tot pijn en functieverlies. Een verbetering van het glijvermogen van de pees kan mogelijk de pijn verlichten, de peesfunctie verbeteren en de kans op verkleving beperken.

Door zijn smerende en visco-elastische eigenschappen ondersteunt OSTENIL® TENDON het glijvermogen van de pezen en ook het fysiologische regeneratieproces. Bovendien hindert OSTENIL® TENDON door zijn macromoleculaire netstructuur de vrije doorgang van inflammatoire cellen en moleculen door de peesschede.

OSTENIL® TENDON is een heldere oplossing van natuurlijk, uiterst zuiver natriumhyaluronaat, dat door fermentatie verkregen wordt en daarom vrij is van dierlijke eiwitten. OSTENIL® TENDON is bovendien gestabiliseerd door toevoeging van mannitol, een afvanger van vrije radicalen. In biocompatibiliteitsonderzoek is OSTENIL® TENDON bijzonder goed verdraagbaar gebleken.

#### Verpakkingen:

Een voorgevulde spuit met 40 mg/2,0 ml OSTENIL® TENDON in steriele verpakking.

#### Uitsluitend door een arts te gebruiken.

Datum van laatste herziening: November 2011